

# CLICKIT SMART

## FIJADOR DE MANO

Cabezales de conexión rápida

Versatil

Modular



# Indicazioni

El sistema de fijación externa modular ClickIt Smart, está indicado para fracturas, osteotomías correctivas, pseudoartrosis y alargamiento óseo de falanges. Su facilidad de uso y ligereza garantizan una fijación estable y la posibilidad de ajustar la alineación incluso durante la fase postoperatoria.

## CARACTERISTICAS

Kit estéril

Minimamente invasivo

Fabricado en aleación de aluminio y acero

## VENTAJAS

Listo para usarse

Fijación percutánea con agujas de Kirschner

Ligero

# Componentes




## Arco

Fabricado en aleación de aluminio para ser ligero y duradero.

El posicionamiento convergente de tornillos/agujas de Kirschner permite el tratamiento de fracturas sin perforar la articulación.

Disponible en dos tamaños.

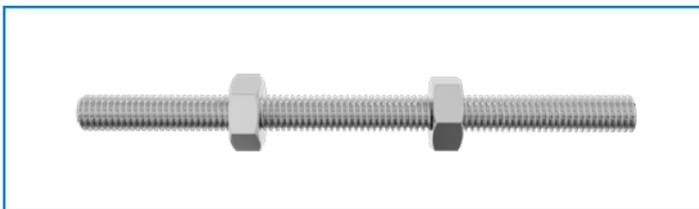

## Barra roscada

Fabricada en acero inoxidable.

Disponible en tres tamaños.



## Cabecial de acoplamiento rápido


Fabricado en aleación de aluminio para ser ligero, resistente y estable.

Permite la rotación en todos los planos.


Acepta tornillos y alambres de los siguientes diámetros 1.5-1.8 mm

# Técnica quirúrgica


(fractura diafisiaria)

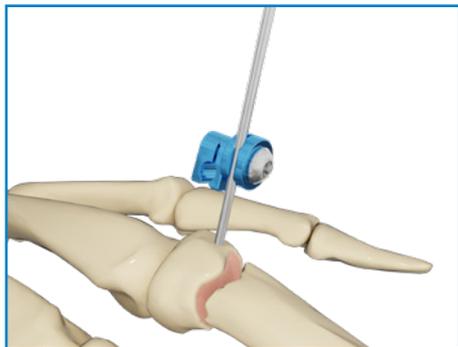


Realice una incisión en la piel y con perforador a baja velocidad inserte la primera aguja. Coloque el primer cabezal a la aguja recién insertada.

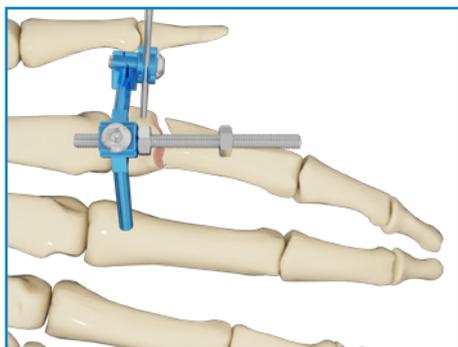

Fije el arco al cabezal e inserte la barra roscada en el espacio indicado.

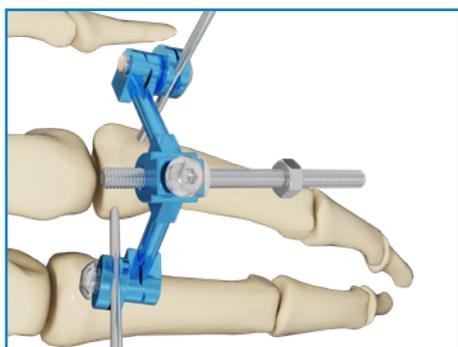

Utilice la barra roscada para localizar el eje correcto. Aplique el segundo cabezal y utilícelo como guía para insertar la segunda aguja. Apriete los dos cabezales con la llave hexagonal.

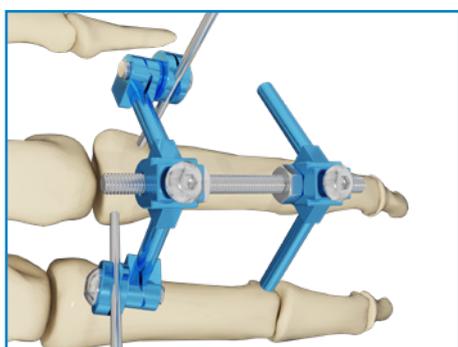

Coloque el segundo arco y proceda con la reducción de la fractura.



Inserte el tercer cabezal y utilícelo como guía para insertar el tercer alambre.



Use el cuarto cabezal como guía e inserte la cuarta aguja.



Verifique que la fractura este alineada y apriete el tercer y cuarto cabezal.



Apriete las cuatro tuercas de la barra roscada.

## Esterilizacion

ClickIt Smart se suministra esteril.

Se recomienda esterilizar los instrumentos en autoclave de vapor saturado bajo los siguientes parametros:

**TEMPERATURA:** 134°

**EXPOSICION:** 5 min

# CLICKIT SMART

## COMPONENTES Y ACCESORIOS

Codigo	Descripcion
5002504ST	Cabezal de puente Smart esteril
5002504ST4	Cabezal de puente Smart (4pz)
5002501ST	Barra roscada Smart pequeña Ø 3.0 mm, L 50 mm
5002502ST	Barra roscada Smart mediana Ø 3.0 mm, L 70 mm
5002503ST	Barra roscada Smart larga Ø 3.0 mm, L 90 mm
500251.5ST4	Aguja de Kirschner Ø 1.5 mm L 100 mm (4pz)
500251.8ST4	Aguja de Kirschner Ø 1.8 mm L 100 mm (4pz)
5002500SST	Arco pequeño Smart
5002500SST2	Arco pequeño Smart (2pz) completo con abrazadera
5002500LST	Arco grande Smart
5002500LST2	Arco grande Smart (2pz) completo con abrazadera
5002431ST	Aguja roscada Ø 1.5 mm L 100 rosca 4.0 mm

## STRUMENTARIO \*

Codigo	Descripcion	Cant.
Componentes:		
5002220	Llave española hexagonal Ø 5.5-8.0 mm	1
5002221	Llave hexagonal en forma de L de 2.0 mm	1
5002222	Llave hexagonal en forma de L de 2.0 mm corta	1
5002223	Destornillador hexagonal de 2.0 mm	1

\* Los dispositivos implantables esteriles estan cubiertos por la marca CE1936, los instrumentos reutilizables no esteriles tienen la marca CE



#### **SEDE LEGAL**

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova  
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210  
[www.mikai.it](http://www.mikai.it) - [servizio.clienti@mikai.it](mailto:servizio.clienti@mikai.it)

#### **PRODUCCIÓN**

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)  
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133  
[www.mikai.it](http://www.mikai.it) - [servizio.clienti@mikai.it](mailto:servizio.clienti@mikai.it)