


CLICKIT ER PELVIS

FIJADOR PELVICO

Cabezal universal
Aplicacion rapida
Kit esteril

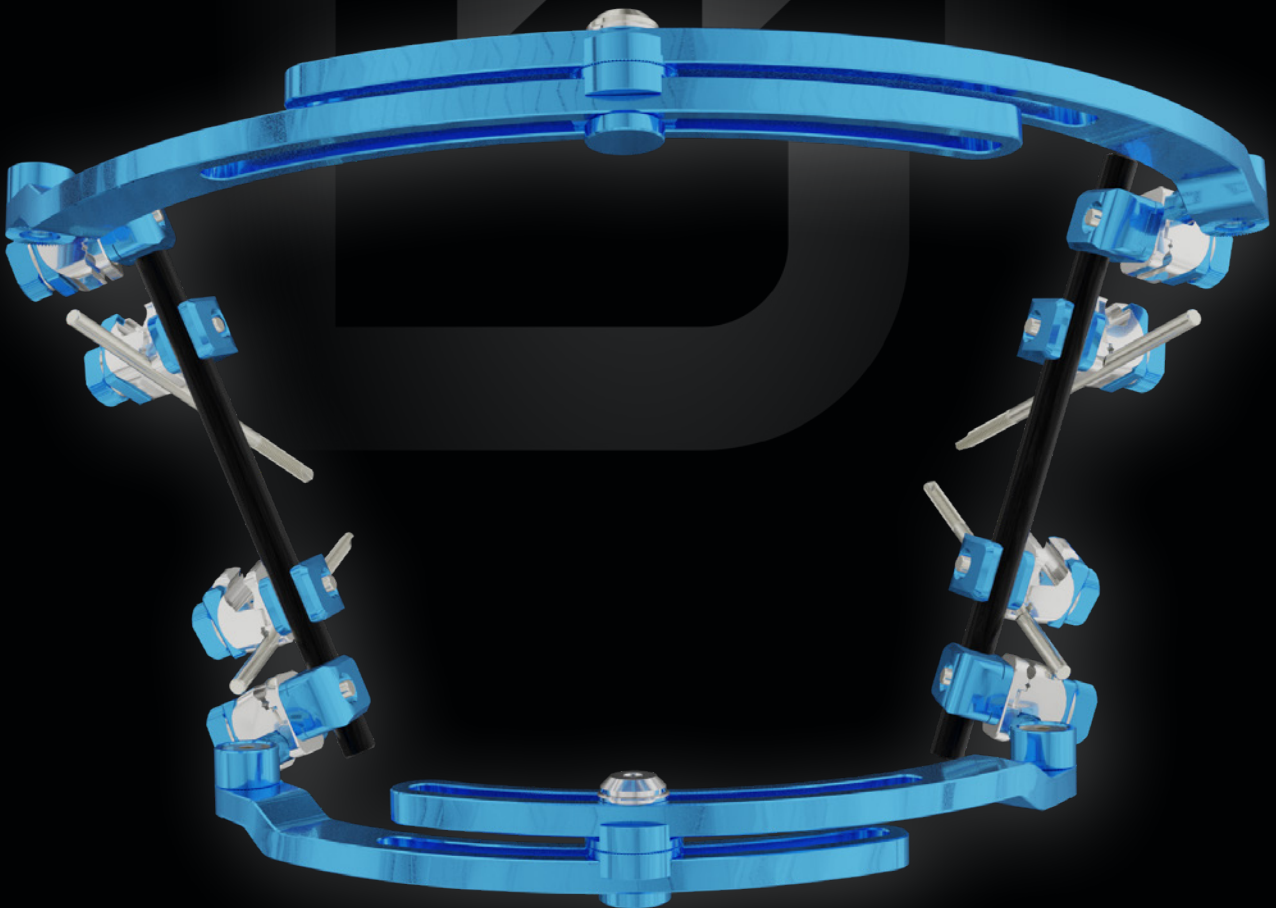

Indicaciones

Estabilizacion de emergencia de inestabilidad pelvica completa.

CARACTERISTICAS

VENTAJAS


Cabezal universal	Acoplamiento barra/barra, barra/tornillo (\varnothing 4.0-5.0-6.0 mm) y barra/aguja
Estabilizacion multiplanar	Mayor estabilidad
Acoplamiento a presion	Aplicacion rapida
Esteril	Listo para usarse

Componentes



Cabezal universal


Un cabezal para todos los tipos de acoplamiento

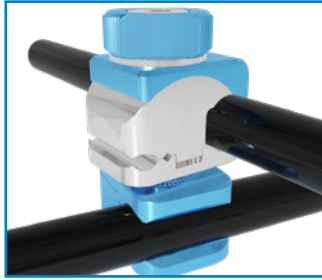

barra/barra




barra/tornillo

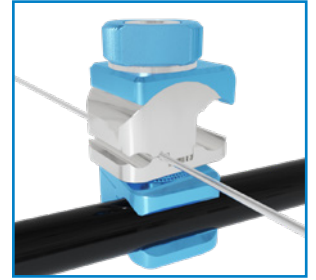

barra/aguja




Barras de 12 mm

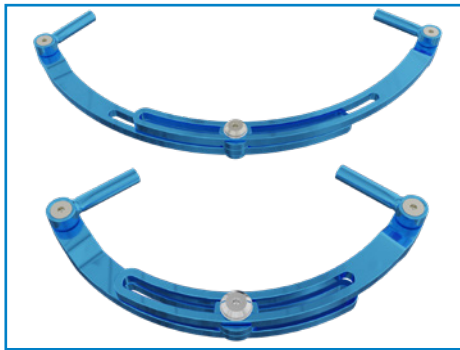

Arcos pélvicos

Fabricado en aleacion de aluminio. Disponible en 2 tamaños: Grande para el lado proximal y pequeño para el lado distal.

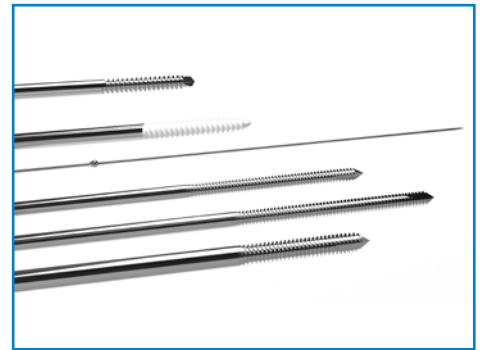

Tornillos óseos auto perforantes

Kit ClickIt ER Pelvis



Descripcion	Cant.
Arco grande (proximal)	1
Arco pequeño (distal)	1
Cabezales universales	8
Barras de carbono Ø 12 mm x 250 mm	2
Tornillos Corticales autoperforantes Ø 6.0 mm L 250 mm rosca 55 mm Instrumental específico	4

Configuración



Esterilización

Los componentes del sistema ClickIt ER se suministran esteriles.

Se recomienda esterilizar los instrumentos en autoclave de vapor saturado bajo los siguientes parametros:

TEMPERATURE: 134°

EXPOSICION: 5 min

CLICKIT ER PELVIS 5006542ST

COMPONENTES Y ACCESORIOS

Codigo	Descripcion
5006508ST	Cabezal Universal
5006504ST	ER Cabezal Multi tornillo
5006510ST	Barra Ø 12 L 100 mm
5006512ST	Barra Ø 12 L 150mm
5006514ST	Barra Ø 12 L 200 mm
5006516ST	Barra Ø 12 L 250 mm
5006518ST	Barra Ø 12 L 300 mm
5006520ST	Barra Ø 12 L 350 mm
5006522ST	Barra Ø 12 L 400 mm
5006526ST	Barra Ø 12 L 500 mm
5006528ST	Barra Ø 12 L 600 mm

INSTRUMENTAL *

Codice	Descripcion	Cant.
5006562	Set de instrumentos completo con envase	
Componentes:		
5000124	Destornillador Hexagonal Ø 3.0 mm	1
5000222	Broca Helicoidal Ø 3.5 mm	1
5000600	Llave a T para Tornillos Ø 4.0 mm	1
5000601	Llave a T para Tornillos Ø 5.0 mm	1
5000602	Llave a T para Tornillos Ø 6.0 mm	1
5000604	Mango de acoplamiento AO	1
5000605	Vastago de Destornillador Hexagonal Ø 5.0 mm	1
5006.04	Adaptador Ø 4.0 mm con enganche AO	1
5006.05	Adaptador Ø 5.0 mm con enganche AO	1
5006.06	Adaptador Ø 6.0 mm con enganche AO	1
5000622	Llave hexagonal en L 5.0 mm	1
5006000	Llave hexagonal en L 3.0 mm	1
5006010	Cánula de perforación Ø 3.5 mm L 110 mm	1
5006564	Plantilla de medicion de Barras ER	1
5006560ER	ClickIt ER envase de Esterilizacion de instrumentos	1

* Los dispositivos implantables y estériles están cubiertos por la marca CE1936. El instrumental reutilizable no estéril está cubierto por la marca CE.





SEDE LEGAL

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUCCIÓN

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it